



Bruk av Digora for Windows

Fosforplaten skannes:

☞ Vent til bildet er skannet ferdig

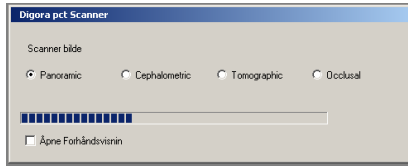


☞ Programmet åpner så arbeidslisten (worklist på nyere norsk)

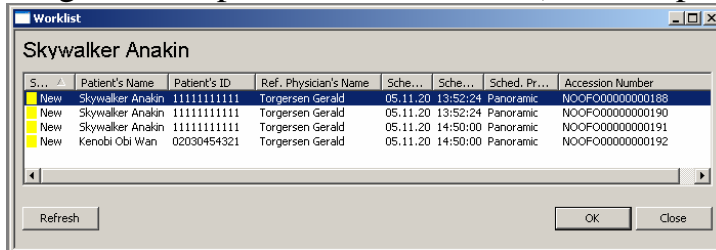


Velg riktig pasient og undersøkelse og trykk ok

☞ Bildet vil nå komme opp med riktig pasient

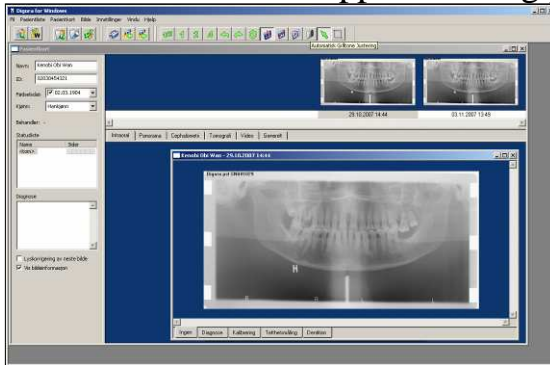


☞ Lukk alle åpne bilder med tasten F10 og velg bildet/bildene som skal sendes inn til PACS.

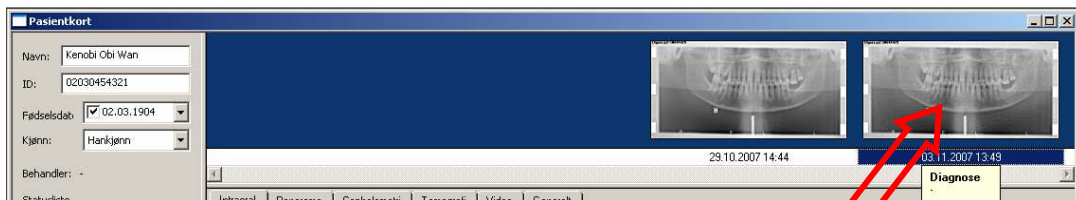

(Hold ned Ctrl-tasten hvis flere bilder skal velges)

☞ Trykk "Send bildene som DICOM-beskjed"-knappen  på menylista eller bruk shortcut Ctrl+M på tastaturet.


☞ Trykk send og send inn bildet til PACS

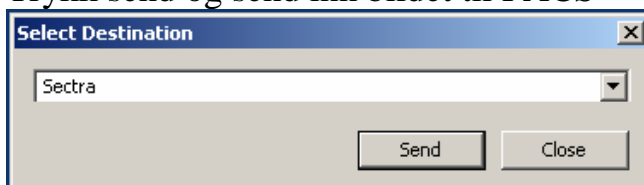

Skanning av flere bilder til en bestilling


Hvis bestillingen inneholder flere enkeltundersøkelser (for eksempel 2 bitewingbilder) gjør man det på følgende måte

☞ Skann første bilde og velg arbeidslistebestilling på vanlige måte

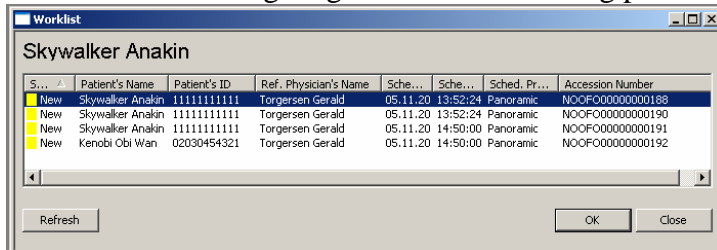

☞ ikke send bildet inn til PACS


☞ scann neste bilde og velg samme arbeidslistebestilling

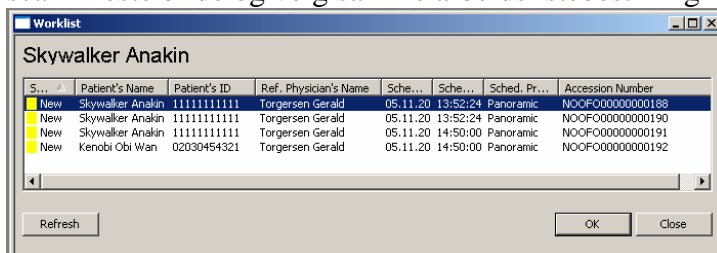


NB: Det gjør ikke noe om scanneren brukes til andre pasienter mellom bildene.

☞ Når de neste bildene er tatt gjenta fra starten til alle bilder er scannet

☞ når **siste** bildet er scannet velger du de bildene som skal sendes inn på PACS (Holde inn Ctrl-tasten og klikk de aktuelle bildene)

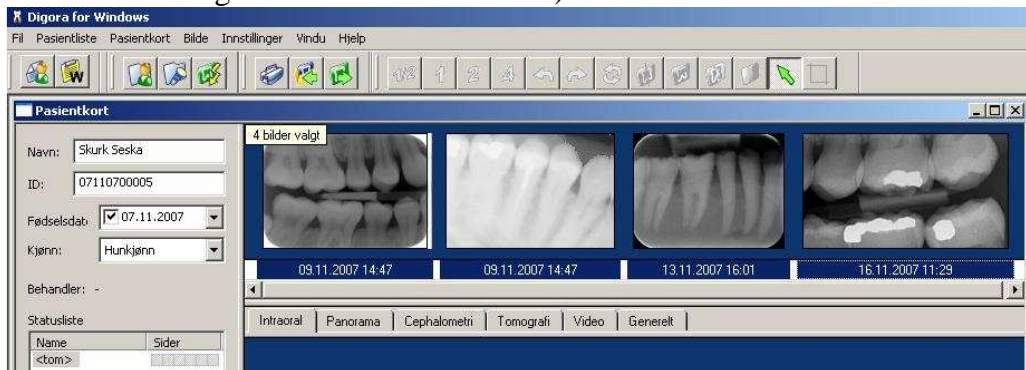

feltet under de valgte bildene blir da blått, her er 4 bilder valgt

☞ Trykk send-tasten 

NB! Du må velge pasienten din fra worklist etter hver skanning!

Forvirret?



Bare spør om hjelp!