



Bruk av Dimaxis mot Sectra PACS


- Trykk knappen som åpner arbeidslisten

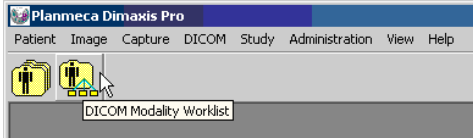


- Trykk på knappen "Get List", eventuelt "Refresh" for å finne pasienten i arbeidslisten

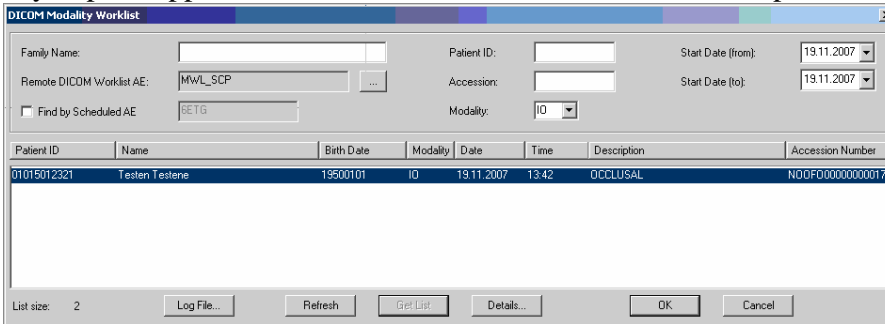


- Dobbelklikk pasienten, eller trykk "Ok"
- Trykk på ikonet for den aktuelle skanneren

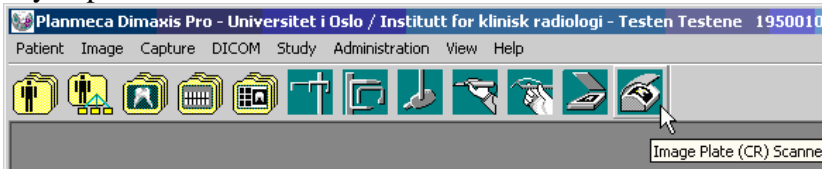

- Sett inn kassetten for occlusal eller start CCD-OPG, så skannes bildet inn på vanlig måte

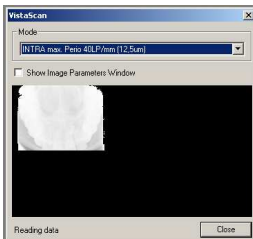

- Trykk "Close" og se på bildet. Trykk "DICOM Storage" knappen og send bildet inn på PACS

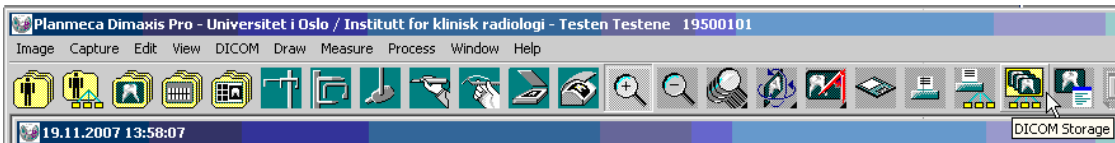

- Klikk "OK" og vent på tilbakemelding om at bildet er lagret

