



Skanning av OPG-bilder på PCT (Student-OPG)




- Hvis programmet DfW (Digora for Windows) ikke kjører på PC-en, start det først.

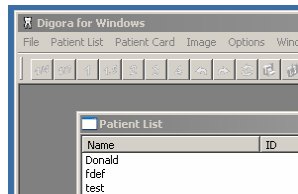


- Skanneren er klar når det lyser grønt to steder:

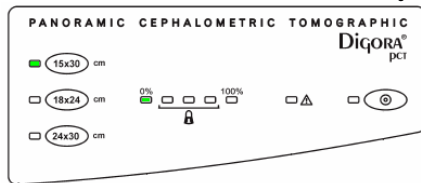


- Ta fosforplaten med beskyttelsesomslaget ut av kassetten

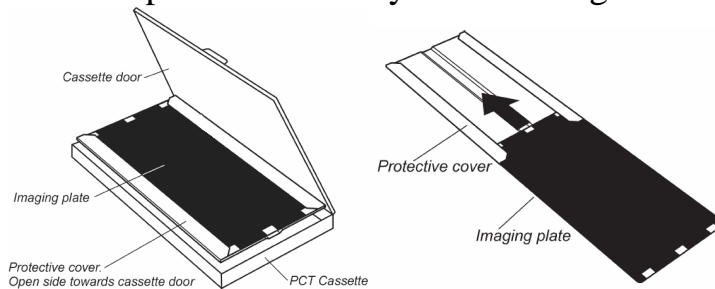

- Åpne lokket på skanneren

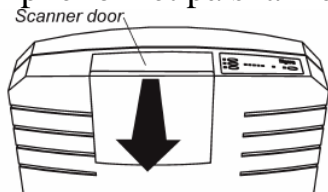

- Skyv fosforplaten med beskyttelsesomslaget i skanneråpningen
NB: Stripen på beskyttelsesomslaget skal peke mot.

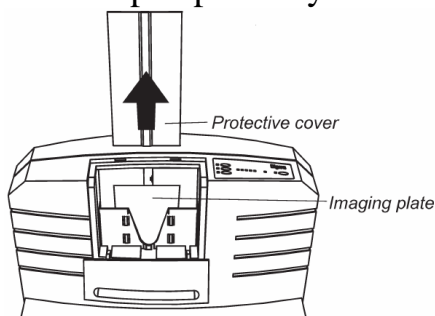

- Trekk opp beskyttelseshylsteret og lukk lokket på skanneren. Den vil da starte opp med å skanne inn bildet
- Platen kan nå fjernes fra skanneren og legges tilbake i kassetten
NB: Husk fosforsiden mot "Tube side"